



# Repy® Dress

## Dressing interattivo per il trattamento delle ferite

Dressing sterile per il trattamento di ferite cutanee di origine chirurgica, traumatica (es. bruciature, avulsioni) e autotraumatica (es. soluzioni di continuo da grattamento).



Dermatologia

PRODOTTO DERMATOLOGICO PER CANI E GATTI.

### Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2011	Repy® Dress 10x10 cm.	25 unità
2012	Repy® Dress 10x10 cm.	5 unità

### Uso

Estrarre il dressing dalla busta e rimuovere la pellicola trasparente. Applicare sulla ferita preventivamente pulita, con il gel a diretto contatto della cute. Assicurare con cerotto o bendaggio elastico. Controllare quotidianamente la ferita sollevando un angolo del dressing fino a rendere completamente visibile l'area da ispezionare. Sostituire il dressing quando saturo di essudato (1 volta al giorno per ferite molto essudative; ogni 3-7 giorni per ferite asciutte).

### Proprietà

**Idrogel di glicerina** in forma solida ad elevato potere assorbente (fino a 100 g di essudato in 24 ore) ed effetto lenitivo, capace di proteggere meccanicamente la ferita e di creare un microambiente ideale alla riepitelizzazione.

Principio funzionale	Funzione
Gel polimerico	Potere assorbente, azione lenitiva
Glicerina (65%)	Igienizzante
Spessore (3,2 mm)	Protezione meccanica
Lycra®	Conformabilità